

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計AS01	HCM-AS01BTWH HCM-AS01WH	Clinical Test Report（臨床性能試験） Standards and methods：ISO 81060-2:2013	<div>■方法</div> <div>• 本体の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。</div> <div>• 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をやわらかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。</div> <div>• 本体内部に水などが入らないようにしてください。</div> <div>• 汚れを落とすときには、アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。</div> <div>• カフは洗濯できません。</div> <div>• カフをぬらさないでください。</div> <div>■耐用期間</div> <div>10,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方</div>	<u>エレコムヘルスケア株式会社</u>